

ANIOS'CLEAN EXCEL D



Čišćenje i
pred-dezinfekcija
instrumenata



- Patentirani koncept
- Originalna kombinacija aktivnih tvari u sinergiji
- Dokazana velika snaga čišćenja
- Ne nagrizi, kompatibilno s mnogo proizvoda

INDIKACIJE


Čišćenje i dezinfekcija medicinske uređaje: kirurški i medicinski instrumenti, toplinski osjetljivi instrumenti i endoskopska oprema prije sterilizacije.

KARAKTERISTIKE

- Deterdžent i dezinficijens čija je namjena umanjiti rizik od stvaranja površinskog biofilma na medicinskim uređajima
- Široki antimikrobni spektar za ograničavanje rizika od unakrsne kontaminacije i osiguravanje sigurnosti zaposlenika
- Dokazana antimikrobna aktivnost, uključujući bakterije s višestrukom otpornošću na lijekove (eng. MDRB) i bakterije izrazito otporne na lijekove (eng. XDRB).
- Formulacija učinkovita u mekanoj i tvrdoj vodi
- Formulacija ne nagrizi i kompatibilna je s mnoštvom materijala
- Poboljšanje ekotoksikološkog profila: GHG* emisije umanjene za 47% u odnosu na slične proizvode
- Jednostavno za isprati
- Može se upotrebljavati u ormarima za ultrazvučne sustave
- Bistra plava otopina
- pH čist proizvod : mini 6.5 - maksi 7.5
- pH na 0,5% u vodovodnoj vodi: 7,4
- Miris limuna

*Staklenički plinovi


RAZRIJEDITI
25 ml > 5L

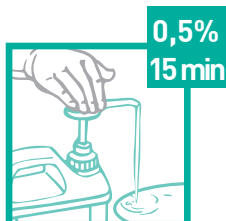

ANIOS'CLEAN EXCEL D


Čišćenje i pred-dezinfekcija instrumenata

UPUTE ZA UPORABU

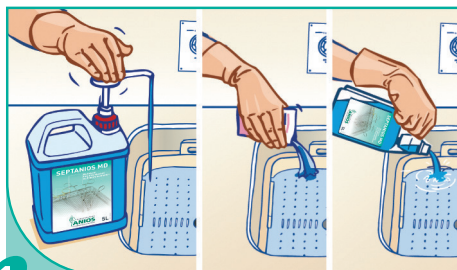


1

Razrjeđenje na 0,5%: ulijte 25 ml u 5 litara hladne ili mlake vode. Barem jednom dnevno promijenite kupku za namakanje.

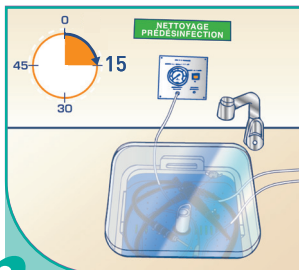


2

Potpuno uronite medicinski uređaj.
Vrijeme namakanja: 15 minuta. Očtkati u slučaju prisutnosti vidljive prljavštine.
Endoskopska oprema: četkati cijevi.

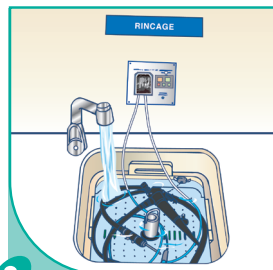

3

Temeljito isprati medicinske uređaje tretirane vodom (s dobrim mikrobiološkim svojstvima) iz vodovoda kako bi se uklonili svi tragovi proizvoda i organske prljavštine.
Endoskopska oprema: isperite unutarnje i vanjske dijelove.

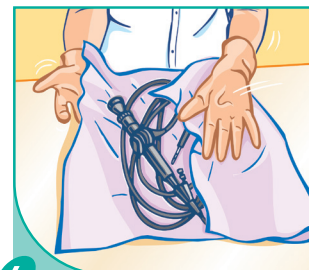

4

Obrišite čistim ručnikom. Prijeđite na sljedeći korak (vidi protokol koji je uspostavila služba).

SASTAV

Didecildimetilamonijev klorid, klorheksidin diglukonat, ne-ionski tenzidi, aroma, bojilo, pomoćne tvari.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).
Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +35 °C.
Medicinski uređaj Klase IIb (Direktiva 93/42/EEZ, s važećim izmjenama i dopunama).

PAKIRANJE

200 doza, svaka od 25 ml Ref. 2416.097

1 12 dozirnih boca, svaka od 1 L Ref. 2416.095

2 4 kanistra, svaki od 5 L + pumpica od 25 ml Ref. 2416.036

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Djelotvoran protiv	Norme	Trajanje kontakta
Bakterije	EN 13727, EN 14561	5 minuta - 0.5%
	EN 13727, djelotvorno protiv bakterija s višestrukom otpornošću na lijekove	15 minuta - 0.5%
Mikobakterije	EN 14348, EN 14563 (<i>M. terrae</i>)	60 minuta - 2%
Kvasci	EN 13624, EN 14562	15 minuta - 0.5%
Virusi	Virus pseudorabies - PRV (surogat za HBV), BVDV (surogat za HCV), virus herpes simplex - HSV, virus vakcinije, virus HIV-1	5 minuta - 0.5%

Cjelokupno antimikrobno djelovanje proizvoda uključeno je u znanstveni dosje koji je dostupan na zahtjev.



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



HR2416-180504 - Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0017 - datum sastavljanja: 03/2017