

TESTNA TRAKA ZA PROVJERU RAZRJEĐENJA OTOPINE ANIOSEPT ACTIV

INDIKACIJA

Trakica za provjeru radne otopine pripremljene sa sredstvom ANIOSEPT ACTIV.

UVJETI ČUVANJA

Trakice ostaju stabilne 18 mjeseci pri povoljnim uvjetima čuvanja - na suhom i hladnom mjestu pri temperaturi ispod +30 °C.

Držite pakiranje zatvorenim kako bi se osigurala trajnost trakica.

UPUTE ZA UPORABU

- Upotrijebite testnu trakicu kako biste provjerili razrjeđenje.
 - Na početku dezinfekcije ili prilikom ponovnog počinjanja nakon prekida.
 - Svakih 4 sata uzastopne aktivnosti (više od 10 endoskopa dnevno).

Tijekom razdoblja učestale aktivnosti ili u posebnim uvjetima (porasti temperature, itd.) možda će biti potrebno povećati učestalost uporabe traka.

- Cijeli reaktivni dio testne trake natapajte 5 sekundi u otopini koja se ispituje.
- Višak otopine uklonite brzim protresanjem testne trake.
- Rezultat očitajte 15 sekundi nakon natapanja. Rezultat nikada ne očitavajte nakon 20 sekundi.



KAKO OČITATI TRAKICU?

Svijetlo zelena boja



Tamno zelena boja



Plava boja



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovica 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: + 33 3 20 67 67 68
www.anios.com

HR/ANIO/17/0019 - datum sastavljanja: 04/2017

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE