

ANIOSEPT ACTIV

2 u 1: Čišćenje i dezinfekcija -
visoko učinkovita dezinfekcija/
hladna sterilizacija medicinskih
pomagala



- 2 u 1 prašak: čišćenje i dezinfekcija + visoko učinkovita dezinfekcija/ hladna sterilizacija
- Široki antibakterijski spektar u 15 min (sporocidan proizvod kod 2% koncentracije)
- Rok trajanja: 2 godine
- Formula bez perborata
- Kontrola otopine specifičnim testnim trakama


INDIKACIJE

Čišćenje i dezinfekcija te visoko učinkovita dezinfekcija/ hladna sterilizacija instrumenata i endoskopa, termosenzitivne opreme.

KARAKTERISTIKE

- Prašak koji oslobađa peroctenu kiselinu
- Bijeli granulat
- Higroskopan prašak (držati na suhom mjestu)
- Lagano parfumiran
- pH razrijeđenog proizvoda (1%): oko 8,5

ZA RAZRJEĐIVANJE

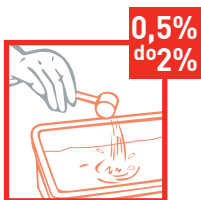

ANIOSEPT ACTIV

2 u 1: Čišćenje i dezinfekcija - visoko učinkovita dezinfekcija/ hladna sterilizacija medicinskih pomagala


UPUTE ZA UPOTREBU

A- Čišćenje i dezinfekcija :




1

Otopiti 25, 50 ili 100 g praška u 5 l vode, ovisno o željenoj koncentraciji⁽¹⁾

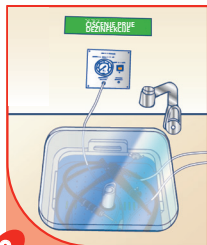

2

U potpunosti potopiti medicinsko pomagalo (kontaktno vrijeme: vidjeti mikrobiološka svojstva). Očistiti te omogućiti protok otopine unutar svih kanala.

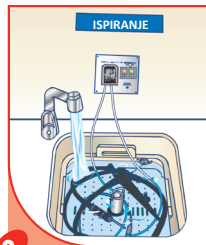

3

Temeljito ispirati medicinsko pomagalo vodom iz slavine (dobre mikrobiološke kvalitete). Za endoskopsku opremu: i vanjske i unutarnje dijelove.

> **Termolabilna oprema:**
Vidjeti idući korak (pogledaj internu proceduru).

> **Oprema pogodna za autoklaviranje:**
Temeljito osušiti čistom krpom te prijeći na idući korak (pogledaj internu proceduru).

B- Visoko učinkovita dezinfekcija/ hladna sterilizacija:




1

Otopiti 25, 50 ili 100 g praška u 5 l vode⁽¹⁾




2

Uroniti u potpunosti prethodno očišćeno medicinsko pomagalo. Ispuniti sve kanale otopinom.

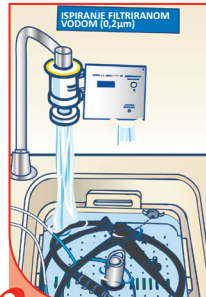

3

Temeljito ispirati medicinsko pomagalo sterilnom ili filtriranom vodom.

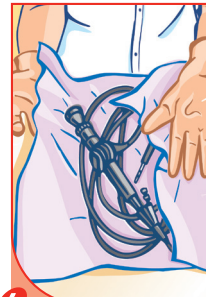

4

Osušiti medicinsko pomagalo sterilnom krpom te odložiti na aseptično mjesto.

⁽¹⁾ Prije potapanja instrumenata, napraviti kontrolu otopine testnom trakicom. 1 dozirna žličica = 25 g.

SASTAV

Puder na bazi natrij perkarbonata, tetraacetiletilendiamina i N-alkil (C12-14)-N-benzil-N,N-dimetilamonijklorida. Proizvodnja peroctene kiseline kod razrjeđenja vodom.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasan proizvod. Slijediti upute za upotrebu (prema direktivi 99/45/EC te njenim prihvaćenim izmjenama). Skladištiti: 5-30°C. Medicinski proizvod IIb klasa rizika (Direktiva 93/42/EEC).

PAKIRANJE

- 1 24 lončica, 100 g svaki.....Ref 1896.734
4 kante, 1 kg svaka.....Ref 1896.733
- 2 2 kante, 5 kg svaka.....Ref 1896.432



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 -
Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

PLIVA

**Laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Rezultati opisani u tablici odgovaraju ispitivanjima napravljenim u **nečistim uvjetima: čišćenje i dezinfekcija**

Potrebna razina dezinfekcije	Kontaktno vrijeme ovisno o koncentraciji ANIOSEPT ACTIVA		
NISKA baktericid, učinkovit protiv kvasaca	0,5 %	1 %	2 %
	5 minuta	5 minuta	-
SREDNJA baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid	60 minuta	30 minuta	15 minuta

Rezultati opisani u tablici odgovaraju ispitivanjima napravljenim u **čistim uvjetima: visoko učinkovita dezinfekcija/ hladna sterilizacija**

Potrebna razina dezinfekcije	Kontaktno vrijeme ovisno o koncentraciji ANIOSEPT ACTIV		
VISOKA baktericid, fungicid, virucid, mikobaktericid, sporocid	0,5 %	1 %	2 %
	90 minuta	60 minuta	15 minuta

Sve antimikrobne aktivnosti proizvoda uključene su u znanstveni dosije, koji je dostupan na zahtjev.

HR1896-170523- Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0018- datum sastavljanja: 03/2017