



ANIOSYME XL3

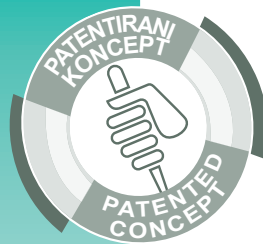

Čišćenje i pred-dezinfekcija instrumenata

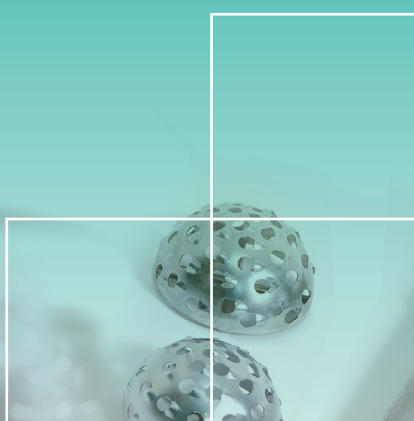

- Patentirana formula
- Vrlo visoka snaga čišćenja
- Optimizirano antimikrobno djelovanje nakon 5 minuta
- Ne nagriza materijal

INDIKACIJE


- Pojačano čišćenje i pred-dezinfekcija medicinskih i kirurških instrumenata, medicinskih uređaja i endoskopske opreme.
- Čišćenje u ultrazvučnim kupkama.
- Prikupljanje uprljanih instrumenata.

KARAKTERISTIKE

- Kompleks tri enzima povezan s novom generacijom ne-ionskih tenzida
- Dokazana djelotvornosti (snaga odmašćivanja, engl. DCP - Degreasing Cleaning Power)
- Dokazana enzimska stabilnost
- Neutralni pH: kompatibilno s legurama
- Bez klorida: ne nagriza materijale
- Kompatibilno s ultrazvučnim procesima
- Bistra narančasta tekućina
- pH čistog proizvoda: ≈ 8
- pH 0.5% vodovodne vode: $\approx 7,3 \pm 0,5$
- Smanjenje emisija stakleničkih plinova od 54% u usporedbi s proizvodima istih indikacija

RAZRIJEDITI
25 ml > 5L



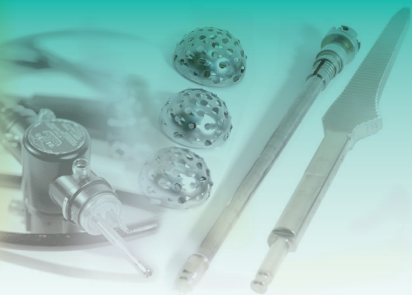

ANIOSYME XL3

Čišćenje i pred-dezinfekcija instrumenata


UPUTE ZA UPORABU



1

Razrjeđenje 0,5%:

Ulijte 25 ml u 5 litara hladne ili mlake vode.

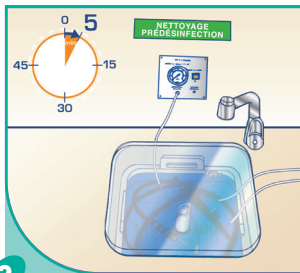


2

Potpuno uronite medicinski uređaj.


Preporučeno vrijeme namakanja: 5 minuta.

Četkati ako je potrebno.
Četkati kanale.

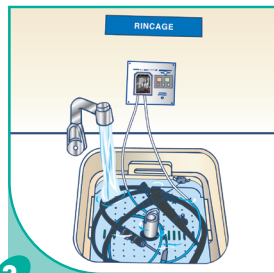

3

Dobro isperite vodovodnom vodom (s dobrim mikrobiološkim svojstvima). Endoskopska oprema: unutarnje i vanjske dijelove medicinskog uređaja.

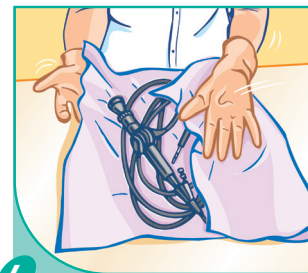

4

Obrišite čistim ručnikom. Prijeđite na sljedeći korak (vidi protokol koji je uspostavila služba).

SASTAV

Kvaterni amonij karbonat, neionski surfaktanti, enzimski kompleks (proteaza, amilaza i manaza), odvajajući agensi, miris, boja, ekscipijensi.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).

Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +35 °C.

Medicinski uređaj Klase IIb (Direktiva 93/42/EEZ, s važećim izmjenama i dopunama).

PAKIRANJE

- 1 Kutija od 200 doza, svaka od 25 ml.....Ref. 2381.097
- 2 12 dozirnih boca, svaka od 1 L.....Ref. 2381.095
- 3 4 kanistra, svaki od 5 L + dozirna pumpica od 25 ml.....Ref. 2381.036



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Djelotvoran protiv	Norme	Kontaktno vrijeme		
		0,5%	1%	2%
Bakterije	EN 1040, EN 13727, EN 14561 Sukladno normi EN 13727, djelotvorno protiv bakterija s višestrukom otpornošću na lijekove	5 minuta		
Mikobakterije	<i>M. terrae</i> : EN 14348, EN 14563	60 minuta	30 minuta	15 minuta
Kvasci	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 minuta		
Virusi	Sukladno normi EN 14476+A1: djelotvoran protiv virusa HIV-1, virusa pseudorabies - PRV (surogat za HBV), herpesvirusa, BVDV (surogat za HCV), virusa vakcinije	5 minuta		

Sve antimikrobne aktivnosti proizvoda uključene su u znanstveni dosije, koji je dostupan na zahtjev.



HR2381 - 180504 - Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0006 - datum sastavljanja: 04/2017