

# TESTNA TRAKA ZA KONTROLU RAZINE PEROCTENE KISELINE

## Za aktiviranu otopinu ANIOXYDE 1000

### INDIKACIJE

Kontrola razine peroctene kiseline u otopini za hladnu sterilizaciju ANIOXYDE 1000.

### UPUTE ZA UPORABU

- Svakodnevno se koristite trakom za ispitivanje kako biste provjerili aktivnost radne otopine: Na početku dezinfekcije ili prilikom ponovnog počinjanja nakon prekida. Svaka 4 sata uzastopne aktivnosti (više od 10 endoskopa dnevno). Tijekom razdoblja učestale aktivnosti ili u posebnim uvjetima (porasti temperature, itd.) možda će biti potrebno povećati učestalost uporabe traka.
- Cijeli reaktivni dio testne trake natapajte 1 sekundu u otopini koja se ispituje.
- Višak otopine uklonite blagim protresanjem testne trake.
- Rezultat očitajte 10 sekundi nakon natapanja. Rezultat nikada ne očitavajte nakon 15 sekundi.

### UVJETI ČUVANJA

Rok trajanja testnih traka ovisi o danu kada su spremljene:

- 30 mjeseca od dana spremanja na temperaturi između +4°C i +30°C.

- 90 dana nakon otvaranja.

Čuvanjem zatvorenog pakiranja osigurava se trajnost testnih traka.

Datum otvaranja :


### INFORMACIJE

Žuta boja otopine Anioxyde 1000 pokazuje da je smjesa aktivatora i generatora upravo napravljena, ali NE pokazuje je li peroctena kiselina prisutna u otopini ili nije.


**U obzir treba uzeti isključivo boju testne trake.**

Obojena otopina (žuta) ili ne + boja testne trake (crna).

Tamno plava do crna boja,

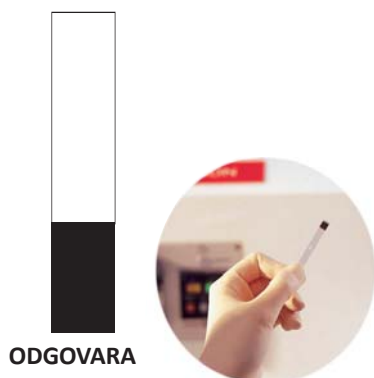

- Bezbojna,  
- Brzo nestajanje boje,  
- Sitne točkice,  
- Obojeni rub

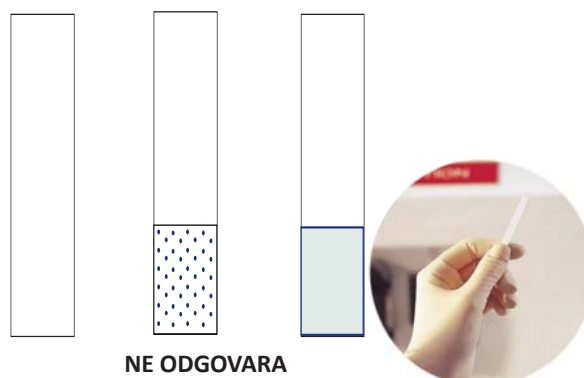

HR100194-170322-Izvanugovorne fotografije



**PLIVA HRVATSKA d.o.o.**,  
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,  
Prilaz baruna Filipovica 25,  
10000 Zagreb, Hrvatska.  
Tel.: + 385 1 37 20 000,  
Faks: + 385 1 37 20 111;  
[www.pliva.hr](http://www.pliva.hr), [www.plivamed.net](http://www.plivamed.net)



Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)

HR/ANIO/17/0019 - datum sastavljanja: 03/2017

**SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE**