

OPASTER'ANIOS

Dezinficijens visokog
stupnja djelotvornosti



- Otopina spremna za uporabu
- Širok antimikrobni spektar
- Kontrola ispravnosti radne otopine pomoću posebne testne trake
- Bez mirisa
- Stabilnost radne otopine: 14 dana

INDIKACIJE

Dezinficijens visoke razine djelotvornosti za medicinske uređaje, kiruršku, medicinsku i endoskopsku opremu i opremu osjetljivu na toplinu.

KARAKTERISTIKE

- Bistra plava otopina
- Aktivna na *Clostridium difficile*
- 0,55%-tna otopina ortohtalaldehida puferirana na pH 7
- Široka kompatibilnost sa svim vrstama materijala
- Rok valjanosti: 3 godine od datuma proizvodnje
- Namijenjen uporabi u kombinaciji s bilo kojim sredstvom za čišćenje prije dezinfekcije

SPREMNO ZA
UPORABU




OPASTER'ANIOS

Dezinficijens visokog stupnja djelotvornosti

UPUTE ZA UPORABU


1

ČIŠĆENJE PRIJE DEZINFEKCIJE

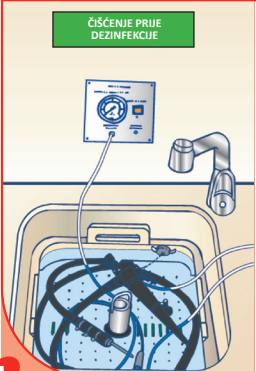


2

DEZINFEKCIJA

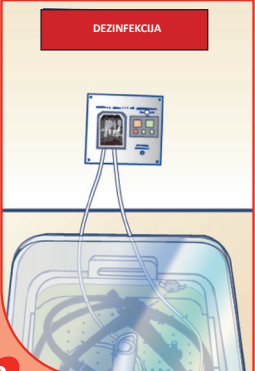


3

ISPIRANJE FILTRIRANOM VODOM (0,2 µm)

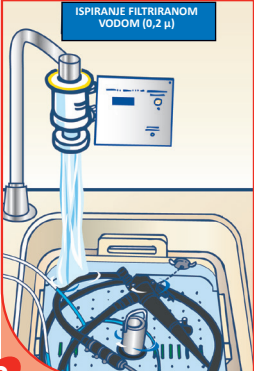

4

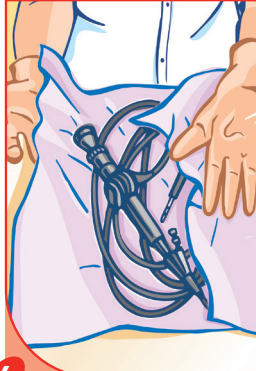

Korak-čišćenje prije dezinfekcije : Očistite medicinski uređaj pomoću deterdženta ili proizvoda za čišćenje prije dezinfekcije, kao što su ANIOSYME XL3, ANIOS'CLEAN EXCEL D ili ANIOSYME SYNERGY 1 i 5. Isperite temeljito. Za endoskopsku opremu: unutarnji i vanjski dijelovi medicinskog uređaja.

Korak -dezinfekcija:
Ulijte otopinu.
Pokrijte spremnik.
Trajanje kontakta: 5 min*
Maksimalno trajanje radne otopine: 14 dana.

Medicinski uređaj temeljito isperite sterilnom ili filtriranom vodom (0,2 µm) unutarnji i vanjski dijelovi medicinskog uređaja

Osušite pomoću ručnika za jednokratnu uporabu. Medicinski uređaj čuvajte u aseptičnim uvjetima sve do ponovne uporabe.

*Djelovanje na Clostridium difficile u roku od 30 minuta.

SASTAV

Puferirano: 0,55%-tna otopina ortoformaldehida, boja, miris

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujujte mjere opreza pri uporabi (Sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).
Čuvati na temperaturi između +5 °C i +35 °C.
Medicinski uređaj Klase IIb (Direktiva 93/42/EEZ s važećim izmjenama i dopunama).

PAKIRANJE

- 1 4 kanistra, svaki od 5 L..... Ref 2504.028
2 Testne trake (kutija s 50 komada)..... Ref 100.110

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Djelotvoran protiv	Norme	Kontaktno vrijeme
Bakterije	EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561	5 minuta
Mikobakterije	EN 14348, EN 14563	5 minuta
Kvasci i plijesni	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 minuta
Virusi	EN 14476	5 minuta
	Virus pseudorabijesa (surogat virusa hepatitisa B), BVDV (surogat virusa hepatitisa C), Vaccinia virus, Herpesvirus	5 minuta
Bakterijske spore	Clostridium difficile O27 (EN 14347, EN 13704)	30 minuta

Cjelokupno antimikrobno djelovanje proizvoda uključeno je u znanstveni dosje koji je dostupan na zahtjev.

