

AEROSEPT 500

Uređaj za
raspršivanje
dezinficijensa
zrakom



- **Tretira prostoriju veličine do 300 m³**
- **Sukladan normi NFT 72-281(2014)**
- **Potpuno automatski postupak s upravljačkom pločom osjetljivom na dodir i opcijom pokretanja s odgodom**
- **Stalni protok proizvoda zajamčen originalnim sustavom venturi cijevi potpomognutim peristaltičkom pumpom**
- **Praćenje na USB prijenosnoj memoriji**
- **Također omogućuje provođenje kontrole insekata i deodorizacije odgovarajućim vezanim proizvodima**
- **Identifikacija prostorije i operatera pomoću čitača bar koda**

INDIKACIJE

Samostojeći automatski atomizator, za dezinfekciju prethodno očišćenih površina putem raspršivanja zrakom.

Za uporabu s proizvodom ASEPTANIOS AD (djelotvoran već nakon 30 minuta).

PROCESI ZA BOLJE REZULTATE

- **Otopina zagrijana na stalnu temperaturu od 55°C** tijekom cijelom trajanja raspršivanja.

- **Uzastopno automatsko reguliranje atomizacije** za optimizaciju kvalitete i učinkovitosti magle.

- **Koncentracija savršeno stabilizirana na 7 ml/m³** zahvaljujući originalnom sustavu venturi cijevi potpomognutom peristaltičkom pumpom.

Brzina protoka kroz mlaznicu ne podliježe mogućim opadanjima protoka i tlaka zraka poput konvencionalnog sustava venturi cijevi.

Vidjeti Znanstveni spis te proučiti sve tvrdnje i istraživanja.



AEROSEPT 500

Uređaj za raspršivanje dezinficijensa zrakom

JEDNOSTAVNI POSTUPAK

- **Potpuno automatizirani postupak** (odabir veličine i operatera pomoću čitača bar koda).
- **Upravljačka ploča osjetljiva na dodir:** svaki parametar odgovara određenom simbolu za jednostavno pokretanje i podešavanje uređaja.
- Unaprijed postavljeno pokretanje s odgodom od 1 minute (podesivo u rasponu od 1 minute do 9 sati).
- Jednostavna zamjena spremnika bez rizika od prskanja.

SIGURNI POSTUPAK

- **Automatski izračun preostale količine proizvoda u spremniku.** Uređaj će se uključiti samo ako je preostala količina dovoljna za tretiranje odabrane prostorije određene veličine.
- **Automatsko zaustavljanje na kraju ciklusa:** prikazuje se oznaka o uspješnoj provedbi ciklusa uz zahtjev za potvrdu operatera.
- **Bez prskanja:** spremnik je opremljen cjevčicom kako bi se izbjegao izravni kontakt s proizvodom.

OPTIMALNA SLJEDIVOST

Ključne informacije mogu se pratiti i može im se ponovno pristupiti pomoću USB prijenosne memorije.

Priključivanjem USB prijenosne memorije na uređaj možete pristupiti informacijama o sljedećem:

- datumu i vremenu
- nazivu i veličini tretirane prostorije
- imenu operatera
- vremenskom trajanju rada
- zamjeni spremnika
- bilo kojim mogućim kvarovima

UPUTE ZA UPORABU

- Jedinicu stavite u kut prostorije
- Uključite je odabirom načina rada za upravljanje
- Identificirajte prostoriju i operatera
- Automatski izračun trajanja difuzije.

- Oznaka vremena završetka ciklusa
- Pokretanje s odgodom koje operateru omogućuje da napusti prostoriju prije nego što tretiranje počne
- Automatsko zaustavljanje na završetku programa
- Proračite prostoriju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet spremnika: spremnik od 5 L
- Nazivna brzina protoka: 1 L/sat
- Težina s praznim spremnikom: ≈ 32 kg
- Dimenzije: visina 900 x duljina 350 x širina 400
- Napajanje: 240/110 V - 50/60 Hz - 5 A

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Prije uporabe uređaja, pročitajte upute.

Proizvodi koji se upotrebljavaju u ovom uređaju su opasni - poštujujte mjere opreza navedene na deklaraciji proizvoda kojim se koristite (Sastavljeno prema europskim pravilima o klasifikaciji i označavanju kemikalija).

Oprezno se koristite biocidima.

Prije uporabe pročitajte deklaraciju i informacije o proizvodu.

REFERENCE

AEROSEPT 500.....	418.000
ASEPTANIOS AD (4 spremnika od 5 L).....	2122.795



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovica 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com