

ANIOXY-SPRAY WS

Deterdžentni
dezinficijens
koji se nanosi
raspršivanjem



- **Proizvod spreman za uporabu**
- **Široki antimikrobni spektar: sporicidno djelovanje na površine**
- **Formulirano bez klora**
- **Ne ostavlja tragove nakon uporabe**

INDIKACIJE

Deterdžentni dezinficijens širokog spektra djelovanja za medicinske uređaje koji se ne smiju uranjati i koji nisu invazivni (stetoskopi, mjerači tlaka, uređaji za mjerenje šećera u krvi, itd.)

KARAKTERISTIKE

- Bistra i tekuća otopina
- pH na temperaturi od +20°C : $\approx 7,5$
- Držite podalje od izvora topline
- Stabilno pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

SPREMNO ZA
UPORABU



ANIOXY-SPRAY WS

Deterdžentni dezinficijens koji se nanosi raspršivanjem

UPUTE ZA UPORABU


Prije svake uporabe osigurajte kompatibilnost otopine s materijalom testirajući proizvod na malom i skrivenom dijelu površine koja se tretira.



1 Raspršite sredstvo izravno po površini koju je potrebno tretirati ili na čistu i suhu netkanu krpu.



2 Krpom trljajte površinu.

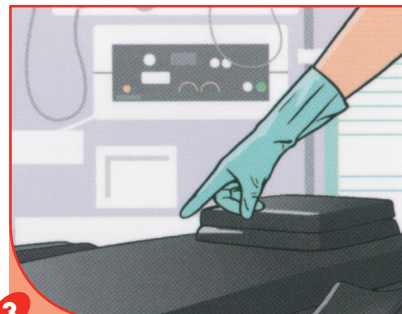

3 U skladu s naznačenim trajanjem kontakta, ostavite sredstvo da njegovo antimikrobno svojstvo počne djelovati. Ne ispirati.

SASTAV

Vodikov peroksid (50 mg/g, tj. 5%), etanol (91,6 mg/g) u vodenom mediju.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda). Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +25 °C **U OKOMITOM POLOŽAJU**. Medicinski uređaj Klase IIa (Direktiva 93/42/EEZ, s važećim izmjenama i dopunama).

PAKIRANJE

• 6 boca, svaka od 1 L.....Ref. 1756.573

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Testovi provedeni u prljavim uvjetima

Djelotvoran protiv	Norme	Kontaktno vrijeme
Bakterije	EN 1040, EN 13727	5 minuta
Mikobakterije	EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i>)	30 minuta
Kvasci	EN 1275, EN 13624	5 minuta
Plijesni	EN 1275, EN 13624	15 minuta
Virusi	EN 14476	30 minuta
	PRV (surogat za HBV)	15 minuta
	BVDV (surogat za HCV)	5 minuta
Spore	EN 13697 (<i>Bacillus subtilis</i>)	30 minuta
	EN 14561 (<i>Bacillus subtilis</i>)	60 minuta
	EN 13697 (<i>Clostridium difficile</i>)	30 minuta

Cjelokupno antimikrobno djelovanje proizvoda uključeno je u znanstveni dosje koji je dostupan na zahtjev.



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



HR1756-170425 - Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0022 - datum sastavljanja: 04/2017