


SURFA'SAFE Premium

Deterđentni dezinficijens
u obliku pjene za površine
i medicinske uređaje

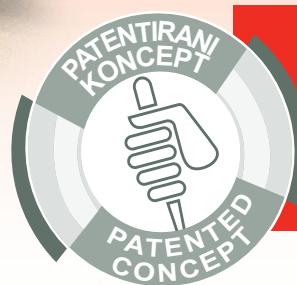

- Patentirani dizajn
- Formulirano bez alkohola, mirisa te karcinogenih, mutagenih i reprotoksičnih tvari
- Brzo antimikrobno djelovanje protiv bakterija (uključujući i one otporne na lijekove), rotavirusa i sl., nakon 2 minuta
- Izrazito kompatibilno s materijalima
- Pjena visoke gustoće kako bi se ograničio nastanak aerosolnih kapljica tijekom primjene

SPREMNO ZA
UPORABU



INDIKACIJE

Deterđentni dezinficijens u obliku pjene za čišćenje i dezinfekciju površina, vanjskih dijelova opreme (respiratori, uređaji za hemodijalizu, itd.) te medicinskih uređaja koji se ne smiju uranjati i koji nisu invazivni (konvencionalne ultrazvučne sonde, mjerači tlaka, uređaji za mjerjenje šećera u krvi, uređaji za mjerjenje krvnog tlaka, refleksni čekić, itd.).

KARAKTERISTIKE

- Čisti i dezinficira nakon samo jedne primjene
- Bez karcinogenih, mutagenih i reprotoksičnih tvari, alkohola, mirisa i bojila
- Široki spektar antimikrobnog djelovanja i optimizirano trajanje kontakta
- Kompaktni dozator pjene za ograničavanje nastajanja aerosola i hlapivih komponenata (750 ml)
- Formula osigurava kompatibilnost s mnoštvom materijala, uključujući i polimere (npr. polikarbonat, pleksiglas, itd.)
- Visoka gustoća pjene za bolje prianjanje uz površinu (750 ml)
- Ne ostaju tragovi nakon sušenja površine
- Biocid tipa 4 koji se može upotrebljavati na površinama koje dolaze u kontakt s prehrabbenim proizvodima i nakon kojeg je potrebno ispiranje
- Poboljšanje ekotoksikološkog profila: GHG* emisije umanjene za 7% u odnosu na slične proizvode
- pH : 6 +/- 0,5


* Staklenički plinovi



SURFA'SAFE Premium

Deterdžentni dezinficijens u obliku pjene za površine i medicinske uređaje

UPUTE ZA UPORABU

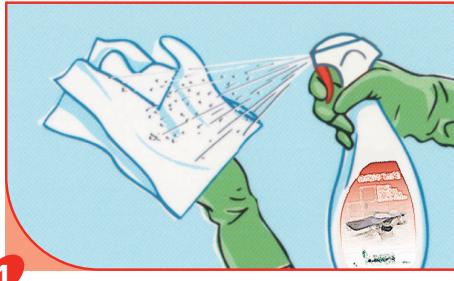

1 Nanesite deterdžent i dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal.

2 Pjenu nanesite na površinu koju je potrebno tretirati. Poštuјte naznačeno trajanje kontakta potrebno za antimikrobnu djelovanje.

3 Ostavite da se osuši. Ne ispirati (osim ako postoji mogućnost da će površina doći u kontakt s prehrabbenim proizvodima ili sluznicom).

SASTAV

Dideciddimetilamonijev klorid (CAS br. 7173-51-5: 3 mg/g), pomoćne tvari.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opošto - poštuјte mjere opreza pri uporabi (sastavljeni prema važećim evropskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda). Pažljivo upotrebljavajte biocidne proizvode. Prije svake uporabe, pročitajte oznaku i informacije o proizvodu. Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +35 °C. Biocidni proizvod za dezinfekciju površina koje dolaze ili ne dolaze u kontakt s prehrabbenim proizvodima (Skupina 1-PT 2 i 4) i medicinskih uređaja Klase IIa - uporaba isključivo od strane stručnih osoba.

PAKIRANJE

1 12 boca, svaka od 750 ml
s dozatorom pjene 2419.544

Otopina koja se ne pjeni:
2 16 boca, svaka od 500 ml 2419.105

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Djelotvoran protiv	Norme	Kontaktno vrijeme
Bakterije	EN 1040, EN 13727, EN 13697	2 minuta
	Sukladno normi EN 13727, djelotvorno protiv VRE, <i>A. baumannii</i> BLSE, <i>E. coli</i> OXA 48, <i>E. cloacae</i> OXA 48, <i>K. pneumoniae</i> OXA 48, MRSA, <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enteritidis</i>	1 minuta
	Sukladno normi EN 13697, djelotvorno protiv VRE, <i>A. baumannii</i> BLSE, <i>E. coli</i> OXA 48, <i>E. cloacae</i> OXA 48, MRSA, <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enteritidis</i>	2 minuta
Kvasci	EN 1275, EN 13697	5 minuta
	EN 13624	2 minuta
Plijesni	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minuta
	Sukladno normi EN 13624, EN 13697, djelotvorno protiv <i>Aspergillus fumigatus</i> i <i>Trichophyton mentagrophytes</i>	15 minuta
Virusi	EN 14476 : <i>Adenovirus</i> , MNV	30 minuta
	Sukladno normi EN 14476: djelotvoran protiv virusa HIV-1, virusa pseudorabies - PRV (surogat za HBV), BVDV (surogat za HCV), virusa vakcinije*, virusa herpes simplex - HSV, rotavirusa, respiratornog sincicijskog virusa - RSV	1 minuta
	According to EN 14476 : Active against <i>Polyomavirus SV 40</i> , <i>Coronavirus</i>	5 minuta

*Institut Robert Koch preporučuje uporabu dezinficijensa na kojima je naznačeno "begrenzt viruzid wirksan", tj. koji imaju ograničeno virucidno djelovanje koje prekida lanac infekcije. Prema navodima Instituta, ograničeno virucidno djelovanje odgovara djelovanju protiv virusa vakcinije i virusa goveđe virusne dijareje - BVDV. Cjelokupno antimikrobo djejanje proizvoda uključeno je u znanstveni dosje koji je dostupan na zahtjev.

PLIVA

PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



1 **2**

HR2419-180504- Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIK
HR/ANIO/17/0013 - datum sastavljanja: 04/2017

ANIOS
laboratoires
Le professionnel de la désinfection