

WIP'ANIOS Excel



- 100% biorazgradive maramice od viskoze

Otopina za impregnaciju:

- Formulacija bez mirisa i alkohola
- Široki virucidni spektar
- Antimikrobna učinkovitost nakon 2 minuta

MARAMICA ZA
JEDNOKRATNU
UPORABU



INDIKACIJE

Obrada neinvazivnih medicinskih instrumenata i uređaja koji se ne mogu potapati*. Brisanje cijevi endoskopa tijekom preliminarnog tretmana prije potapanja radi čišćenja i dezinfekcije. * Primjeri: konvencionalne ultrazvučne sonde, senzori tlaka, testeri za glukozu, monitori za praćenje krvnog tlaka, čekići za mjerenje refleksa, itd.

KARAKTERISTIKE

- Sastav: 100% viskoza (spunlace 50g/m²)
- Dimenzije maramice: 180 x 200 mm
- Impregnacijska otopina: 5 ml SURFA'SAFE PREMIUM po maramici

SASTAV


Maramice impregnirane otopinom za čišćenje i dezinfekciju: Didecildimetilamonij klorid (CAS Br. 7173-51-5: 3 mg/g), neionski surfaktanti, sekvestrirajući agensi, ekscipijensi.

WIP'ANIOS Excel


UPUTE ZA UPORABU



Uzmite maramicu i pravilno zatvorite ambalažu.

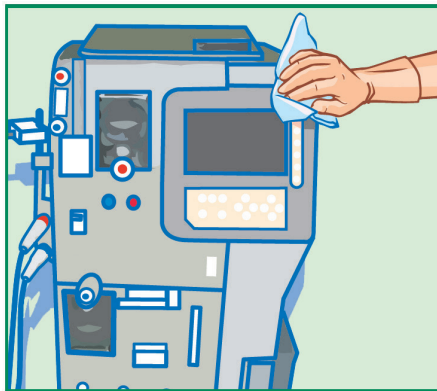

Nanesite maramicu na područje koje želite tretirati. Koristite drugu maramicu ako je to potrebno. Poštivati vrijeme kontakta za očekivano djelovanje.

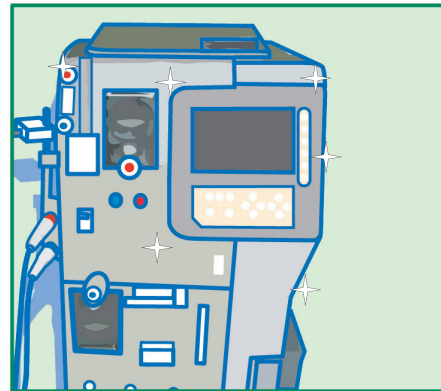

Pustite da se osuši. Nema potrebe za ispiranjem, osim u slučaju duljeg kontakta s kožom ili sluznicom. Zatvorite ambalažu nakon svakog otvaranja.

Napomena: WIP'ANIOS EXCEL nisu zamjena za čišćenje i dezinfekciju potapanjem, ako je potapanje moguće.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno – poštivati mjere opreza za uporabu (Sastavljeno u skladu s europskim propisima na snazi koji se odnose na razvrstavanje i označavanje kemijskih proizvoda). Skladištenje: od +5°C do +35°C. Medicinski proizvod klase IIb (Direktiva 93/42/EEZ s izmjenama i dopunama).

AMBALAŽA

6 mekih pakiranja od
100 maramica.....Ref. 2446.655

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Vlažne maramice WIP'ANIOS Excel imaju baktericidno djelovanje i uništavaju kvasce po EN 16615. Otopina za impregnaciju je:

Aktivna protiv	Standardi	Vrijeme kontakta
Bakterije	EN 13727	1 minuta
	EN 16615	2 minuta
	EN 13727 protiv <i>ERV</i> , <i>A. baumannii</i> βLSE, <i>E. coli</i> OXA 48, <i>E. cloacae</i> OXA 48, <i>K. pneumoniae</i> OXA 48, MRSA	1 minuta
	EN 13697 protiv <i>ERV</i> , <i>A. baumannii</i> βLSE, <i>E. coli</i> OXA 48, MRSA	2 minuta
Kvasci	EN 13624	2 minuta
	EN 16615	2 minuta
Plijesni	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minuta
Virusi	EN 14476 : <i>Adenovirus</i> , MNV	30 minuta
	PRV (Model virusa HBV), BVDV (Model virusa HCV), <i>Vacciniavirus</i> , HSV, <i>Rotavirus</i>	1 minuta
	<i>Polyomavirus SV 40</i>	5 minuta

Sve antimikrobne aktivnosti proizvoda uključene su u znanstveni dosije, koji je dostupan na zahtjev.

PLIVA

Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



HR2446DM-170322-Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0014 - datum sastavljanja: 03/2017